



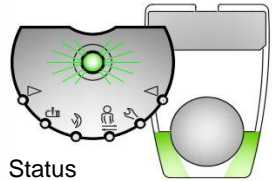
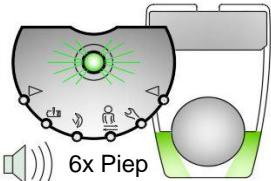
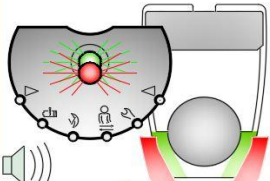
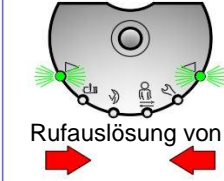
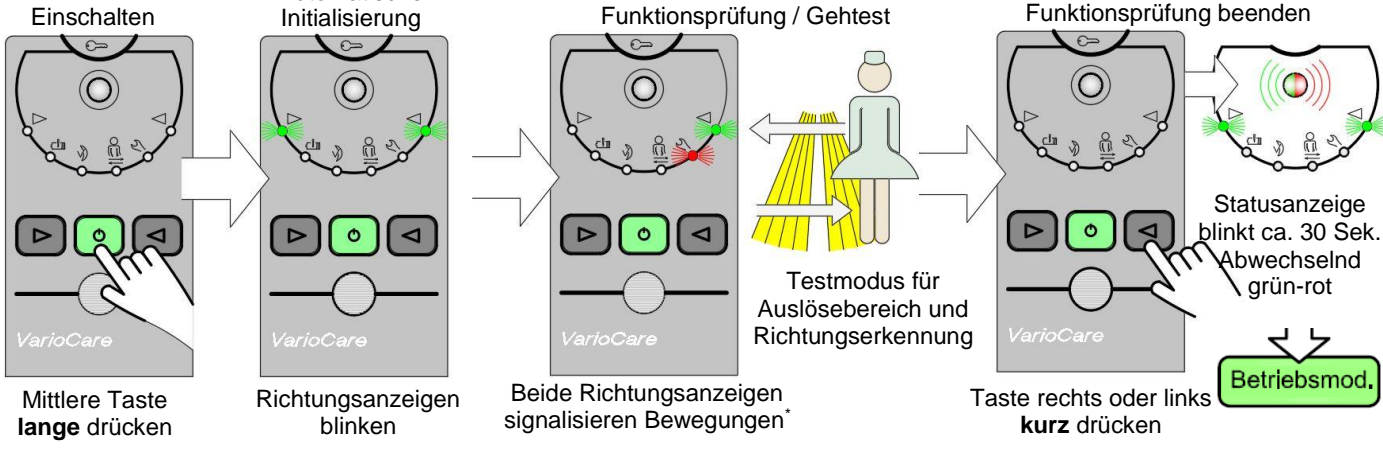


## Standardfunktionen des VarioCare

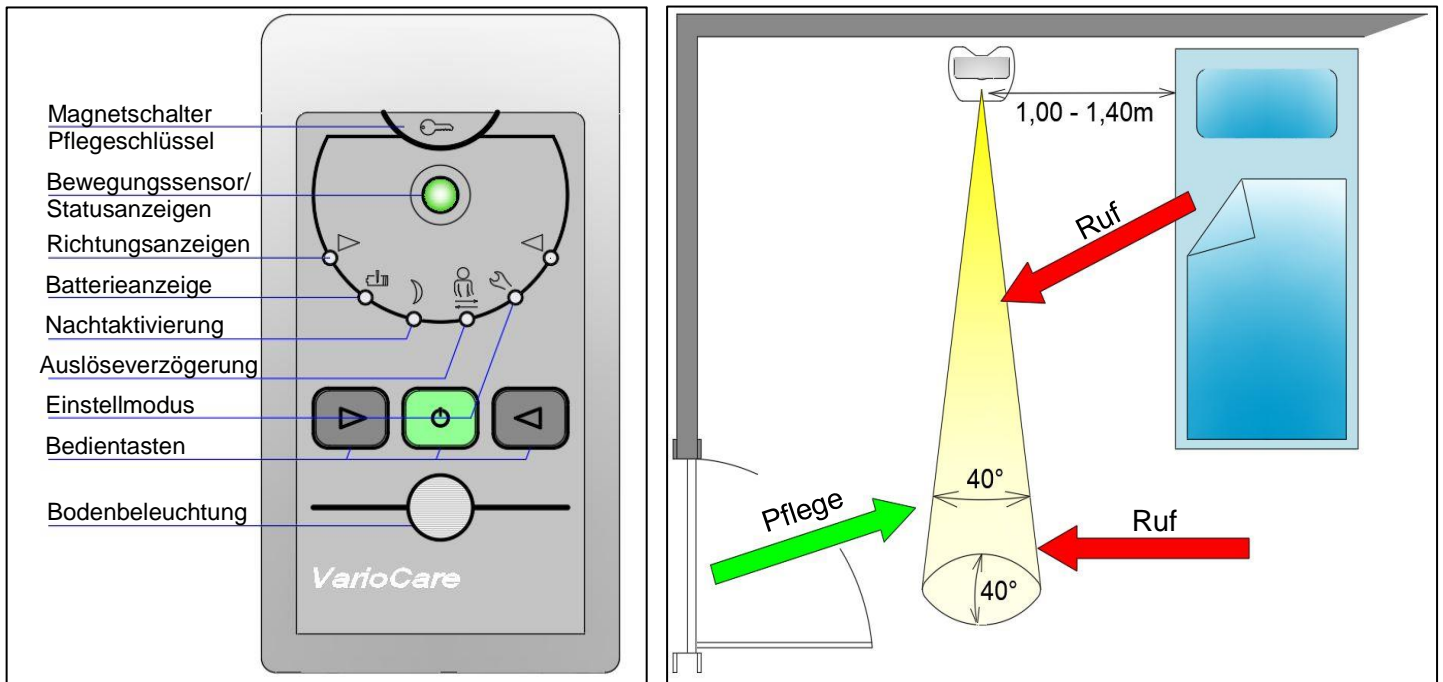

<p><b>Ein-/Ausschalten</b></p> <p> jeweils lange drücken</p> <p><b>Pflegemodus aktivieren</b></p> <p> oder  kurz drücken</p> <p>siehe Seite 2</p>	<p><b>Pflegemodus</b></p>  <p>Status blinkt grün</p>	<p><b>Voralarm Ruf</b></p>  <p>6x Piep</p>	<p><b>Voralarm Pflege</b></p>  <p>Betrieb</p>	<p><b>Richtungserkennung</b></p>  <p>Rufauslösung von</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Inbetriebnahme**



**Einschalten**  
Mittlere Taste **lange** drücken

**Automatische Initialisierung**  
Richtungsanzeigen blinken

**Funktionsprüfung / Gehtest**  
Beide Richtungsanzeigen signalisieren Bewegungen\*

**Funktionsprüfung beenden**  
Taste rechts oder links **kurz** drücken

Statusanzeige blinkt ca. 30 Sek. Abwechselnd grün-rot

**Betriebsmod.**

\*Bei eingeschalteter Richtungserkennung blinkt die LED, aus der eine Bewegung wahrgenommen wird.


**Betriebsmod.**

**Betriebsmodus VarioCare:** Die Richtungsanzeigen blinken **langsam**.


Bei Aktivierungen des Erfassungsbereiches zeigen die Richtungsanzeigen statisch an, von welcher Seite ein Alarm erfasst wird. Bei Betreten des Sensorbereiches wird ein Voralarm von 10 Sek. aktiviert und die **Statusanzeige** blinkt **rot**. Während dieser Zeit **kann** der Pflegemodus gesetzt werden. Nach Ablauf der Voralarmzeit wird ansonsten ein Alarmruf ausgelöst.



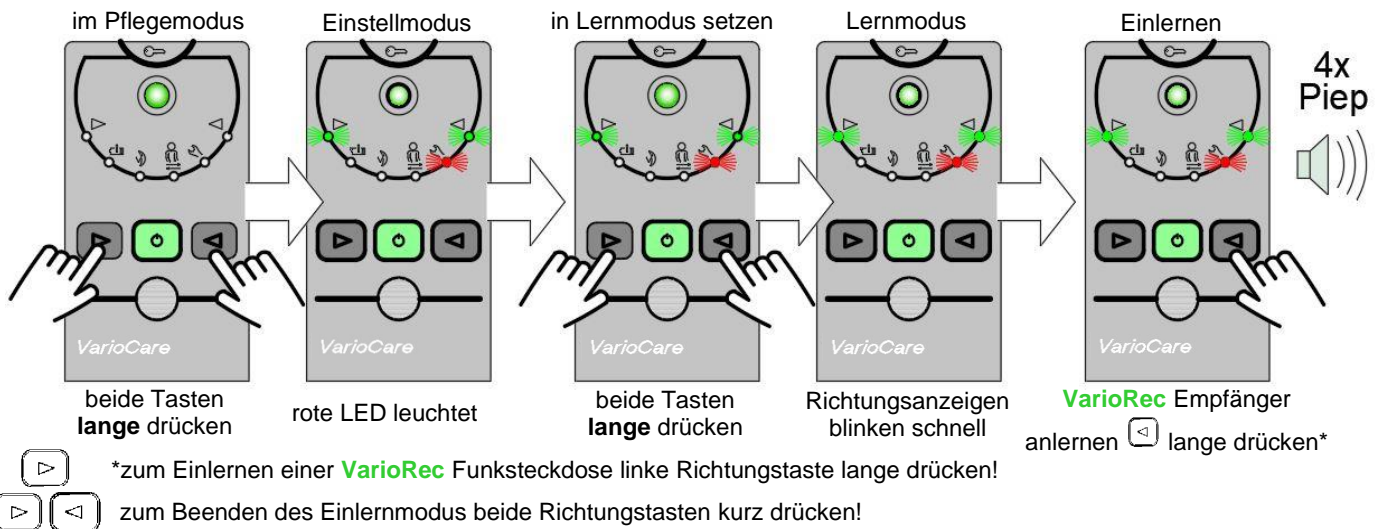

## Einlernen an einen VARIOREC® Funkempfänger (nicht im Lieferumfang)

Zum Einlernen des VarioCare Bewegungssensors muss zunächst der entsprechende VarioRec Funk-Empfänger in den Lernmodus gebracht werden (siehe Anleitung Funkempfänger)!





im Pflegemodus    Einstellmodus    in Lernmodus setzen    Lernmodus    Einlernen

beide Tasten **lange** drücken    rote LED leuchtet    beide Tasten **lange** drücken    Richtungsanzeigen blinken schnell    **VarioRec** Empfänger anlernen  lange drücken\*


  \*zum Einlernen einer VarioRec Funksteckdose linke Richtungstaste lange drücken!  
  zum Beenden des Einlernmodus beide Richtungstasten kurz drücken!

## Möglichkeiten zur Pflegemodus-Aktivierung (Pflegezeit 10 Minuten voreingestellt)

- über Taster am **VarioCare**  oder 
- über Pflegeschlüssel am VarioCare
- automatisch über Richtungserkennung
- über **VarioCare** Remote Funkfernbedienung (Zubehör)
- über Pfeletaster Fußbetrieb (Zubehör)

## Pflegeschlüssel (im Lieferumfang)



Über den Magnetschlüssel besteht die Möglichkeit, den **VarioCare** in den Pflegemodus zu setzen. Dazu wird der Magnetschlüssel kurz oben am **VarioCare** vor die Fläche mit dem Schlüsselssymbol gehalten. Die Statusanzeige **blinkt** daraufhin **grün** und zeigt die Aktivierung des Pflegemodus an. 



**Achtung:** Verbleibt der Pflegeschlüssel auf der Aktivierungsfläche (Schlüsselssymbol) des **VarioCare**, bleibt die Pflegezeit **so lange aktiv, bis** der Schlüssel wieder entfernt wird!

## Batteriemanagement

Auf der Unterseite des **VarioCare** befindet sich die Ladebuchse zum Aufladen des internen Lithium-Ionen Akkumulators. Um diesen zu laden sind **nur** vom Hersteller bereitgestellte und zugehörige Netzteile zu nutzen. Das Ladekabel ist **nicht im zusammengerollten** Zustand bei der Ladung zu verwenden (Überhitzungsgefahr).



### Achtung!

Den **VarioCare** nicht längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen!  
Die Umgebungstemperatur darf **-15 °C** nicht **unter-** und **+60 °C** nicht **überschreiten**.  
Bei Missachtung kann der interne Akkumulator irreparabel geschädigt werden!



Sensorbedingt können extrem langsame Bewegungen (<4m/s) nicht immer richtig erkannt und ausgewertet werden!