

Warnung



Die Verwendung dieses Funk-Meldeklissens entbindet nicht von der Aufsichtspflicht über die damit unterstützten Personen. Als Rufgerät bietet es Unterstützungskomfort und ermöglicht, Beobachtungszeiträume zu verlängern. Dieses Produkt darf nicht zur Überwachung von kritischen und vorhersehbaren, lebensbedrohlichen Zuständen eingesetzt werden.

Das System ist regelmäßig auf Funktion zu kontrollieren. Bei Störungen und fehlerhaftem Verhalten ist das Produkt bis zur Kontrolle durch eine sachkundige Person nicht mehr zu betreiben. Lesen Sie vor der Verwendung sorgfältig diese Anleitung und heben Sie diese auf.

Produktvarianten

Ausführung	Artikelnummer ¹	Frequenz ¹
MediSeat – Funk- Meldeklissen	990.201.80	869,2125 MHz
Beipack		
MediSeat Funk- Meldeklissen Bedienungsanleitung	LE310	

¹Artikelnummer und Frequenz sind auf dem Typenschild hinterlegt (Bild 3).

Tipp: Überprüfen Sie nach dem Auspacken die Lieferung auf Vollständigkeit und auf Beschädigungen.

Hinweis: In dieser Beschreibung wird das „MediSeat Funk- Meldeklissen abgekürzt auch als „MediSeat“ bezeichnet.

Verwendung

Das **MediSeat** wird als Sitzkissen eingesetzt. Bei Verlassen einer sitzenden Position wird eine Funkmeldung an den zugehörigen **VARIOREC®** Funkempfänger mit gleicher Frequenz gesendet.

Funktion

Bei Entlastung des Kissens von mehr als 3 Sekunden wird der batteriebetriebene Funk-Sender ausgelöst. Dieser sendet ein Funksignal an den zugehörigen Empfänger. Wie und wohin die Meldungen von dort geleitet werden, bestimmt das Rufsystem. Damit verbundene Funktionen und Maßnahmen sind deren Beschreibungen zu entnehmen.

Betrieb

Nach Entnahme des Batterieschutzes und Anlernen an einen Rufempfänger ist das **MediSeat** betriebsbereit.

Bild 1: MediSet Funk-Meldeklissen



Rufmeldung abstellen

Bei jeder Auslösung sendet das **MediSeat** eine Meldung. Üblicherweise nimmt das nachfolgende Rufsystem eine Rufspeicherung vor, welche eine persönliche Rückstellung verlangt. Das Vorgehen dazu ist der Beschreibung des Rufsystems zu entnehmen. Ein Rückstellen am **MediSeat** ist nicht möglich.

Erst-Inbetriebnahme

Der Batterieschutz wird entfernt. Zum Empfang ist jeder **VARIOREC®** Funkempfänger mit gleicher Frequenz geeignet.

Einlernen / Löschen des MediSeat an einen Funkempfänger

Das zur Erstinbetriebnahme erforderliche „Einlernen“ und bei einer Portierung eventuell erforderliche „Löschen“ am Funkempfänger entnehmen Sie bitte der jeweiligen Empfänger-Bedienungsanleitung.

Reichweite der Funkverbindung

Die Funkreichweite entspricht den Anforderungen der technischen Prüfstelle der Krankenkassen. Aufgrund dieser Spezifikation kann innerhalb von Gebäuden mit ca. 30 m Reichweite gerechnet werden, im Freien 200 m. Allerdings hängt die Entfernung wesentlich von den örtlichen, baulichen Gegebenheiten ab, vor allem, wenn Zwischenwände die Funkwellen dämpfen. Verringern kann sich die Entfernung zusätzlich, wenn Funkstörer in der näheren Umgebung den Empfang beeinträchtigen. Deshalb die Information zum Prüfen der Funkreichweite beachten.

Prüfen der Funkreichweite am Einsatzort

Vor erstmaliger Verwendung ist die störungsfreie Funkverbindung zu prüfen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Schalten Sie alle in der näheren Umgebung befindlichen elektronischen Unterhaltungs- und Kommunikationsgeräte wie Fernseher, Spiele und Computer **ein**.
2. Prüfen Sie die Funkmeldung zum Funkempfänger in ca. 5–10 m Zusatzabstand gegenüber dem vorgesehenen Gebrauchsabstand. Achten Sie darauf, dass die Meldung mit einer einzigen Rufauslösung ausgelöst wird!

Wichtig: Wenn in der Rufumgebung die Platzierung elektronischer Geräte verändert wird, oder neue in Betrieb genommen werden, ist die Prüfung der Funkreichweite erneut durchzuführen.

Meldungen der LED-Signalanzeige

Tabelle 1: Signalisierungen der LED-Signalanzeige

Artikelnummer / Frequenz	Rufsignal	Rufsignal mit „Batterie schwach“ Meldung
990.201.80 / 869 MHz	3 x Blinken	2 x Blinken

„Batterie schwach“- Meldung

Bei jeder Rufauslösung wird vom Funk-Meldemodul zusätzlich der Batteriezustand geprüft. Bei sich leerender Batterie erfolgt dadurch zusätzlich zur Rufmeldung auch eine „Batterie schwach“- Meldung an den Funkempfänger.

Batteriewechsel

Erscheint eine „Batterie schwach“- Meldung, ist im Auswertemodul vom **MediSeat** innerhalb der nächsten Wochen die Batterie zu wechseln (siehe Seite 3)

Regelmäßige Maßnahmen

Vorgeschlagen wird eine wöchentliche Besichtigung mit Prüfruf-Auslösung und Beobachtung aller Melde-Elemente der Anlage. Prüfen Sie dabei auch, ob eine „Batterie schwach“-Meldung erfolgt. Empfohlen wird zudem eine monatliche Kontrolle der Funkreichweite.

Anm.: Die Funk-Reichweitenprüfung sollte vor allem dann durchgeführt werden, wenn sich der Empfänger in einem anderen Raum befindet.

Reinigung

Empfohlen wird ein weicher, leicht feuchter Lappen mit etwas Spülmittel ggfs. mit Zusatz von Desinfektionsmittel. Auf keinen Fall scheuernde / ätzende Reinigungsmittel verwenden. Nur Desinfektionsmittel gem. EN 16615 bzw. VAH-Liste anwenden.

Technische Daten

Ausführung:	sehr flaches, robustes, abwaschbares Sitzkissen mit Funkweiterleitung
Meldung:	Funkübertragung bei Entlastung
Meldeverzögerung:	ca. 3 Sekunden
Auslösegewicht:	ca. 10 kg
Funk-Frequenz:	869,2125 MHz (Sozialalarm-Frequenz)
Stromversorgung:	Knopfzelle 3 V; Ausführung CR 2430 Betriebsdauer bei einmaligem, täglichen Gebrauch ca. 3 Jahre
Farbe Schutzkissen:	Grau
Schutzart Kissenteil:	IP 54 (feuchteresistent)
Abmessungen:	Kissen: 400 x 400 x 15 mm (BxTxH)
Gewicht:	ca. 310 g
Konformität:	CE (RED RL, RoHS RL)

Batterie wechseln



Wichtig

Nach einem Batteriewechsel ist immer die Rufauslösung und Funkreichweite wie bei einer Erstinbetriebnahme zu prüfen.


Bild 3: Batterie wechseln

1. Rückseitige Batterieabdeckung vom Funkmodul des MediSeat durch Lösen der 4 St. Kreuzschlitzschrauben öffnen (Abb. 1).
2. Batterieabdeckung abnehmen.
3. Unter der Abdeckung befindet sich das Funkmodul mit der Batterie (Abb. 2).
4. Verbrauchte Batterie mit einem nichtmetallischen Gegenstand aus dem Batterie-Haltering herauschieben und neue Batterie, Typ CR2430 einsetzen (+ Pol nach oben).
5. Darauf achten, dass das Funkmodul bündig abschließt.
6. Batterieabdeckung wieder aufsetzen und die 4 St. Kreuzschlitzschrauben anschrauben.
Dabei die Schrauben nur leicht anziehen, um die Gewinde nicht zu beschädigen.
7. **Wichtig:** Einen Funktionstest und eine Funkabstandsprüfung wie bei der Erstinbetriebnahme durchführen.

Abb. 1: Batterieabdeckung



Abb. 2: Funkmodul mit Batteriehalterung

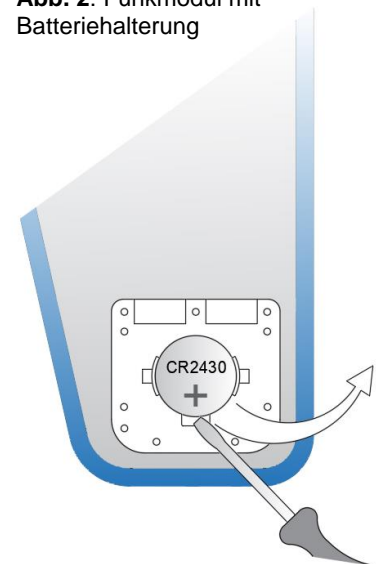



Gewährleistung

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder bestimmungsfremden Gebrauch entstehen. Innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen, durch Reparatur oder Umtausch.

Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff oder unsachgemäßer Behandlung. Sie gilt nicht für Verschleiss beweglicher oder Wechsel-Teile.

Serviceadresse

Sollten trotz sachgerechter Handhabung Störungen auftreten, oder wurde das Gerät beschädigt, wenden Sie sich bitte zunächst an Ihren Händler oder an die folgende Adresse:

Lehmann Electronic GmbH – Wahner Str. 45 – 53859 Niederkassel

Entsorgungshinweise

Altgeräte und Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie Altgeräte, Altbatterien und Verpackungsmaterial gemäß den geltenden Gesetzen und Entsorgungsvorschriften.



Konformität und gesetzliche Regelungen

Hiermit erklärt Lehmann Electronic, dass sich das Produkt soweit zutreffend in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der EMV RL 2014/30/EU, der RED RL 2014/53/EU, und der RoHS RL 2011/65/EU befinden. Die vollständigen Konformitätserklärungen finden Sie im Internet unter www.lehmannweb.de.



REACH Verordnung Im Sinne der Verordnung sind wir nachgeschalteter Anwender. Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig. Weitere Informationen sind auf der Homepage einsehbar.