

Lieferumfang


Produkt	Materialnummer
VarioCare Wandhalterung, flexibel	990.242.11
Diese Montageanleitung	LE411

Tipp: Überprüfen Sie nach dem Auspacken die Lieferung auf Vollständigkeit und auf Beschädigungen.

Bild 1: Wandhalter frontal

Um 45 Grad nach links und rechts einstellbar.


1. Vor der Ausrichtung des VarioCare die Fixierungsschraube mit einem Schraubendreher lösen.
2. Die gewünschte Einstellung des VarioCare vornehmen.
3. Abschließend die Schraube wieder fixieren.

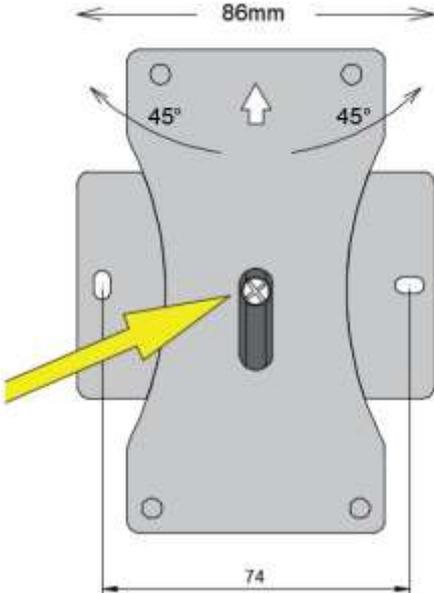

Wandmontage durch 2 im Lieferumfang enthaltenen Schrauben links und rechts.
Lochabstand 74 mm

Bild 2: Wandhalter seitlich

Um 30 Grad nach oben und unten flexibel einstellbar.

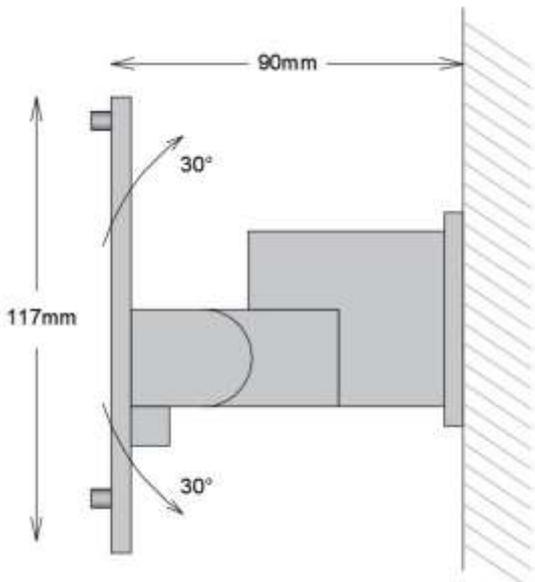



Universelle flexibel ausrichtbare Montage



Magnetische Eckhalter.

Melder ganz einfach aufzuklicken oder wieder abnehmbar.



Konformität und gesetzliche Regelungen

Hiermit erklärt AAL Homecare, dass sich das Produkt soweit zutreffend in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der EMV RL 2014/30/EU, der RED RL 2014/53/EU, und der RoHS RL 2011/65/EU befinden. Die vollständigen Konformitätserklärungen finden Sie im Internet unter www.aal-homecare.com.



REACH Verordnung Im Sinne der Verordnung sind wir nachgeschalteter Anwender. Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig. Weitere Informationen sind auf der Homepage einsehbar.