


**Warnung**



Der **VarioSwitch Atemsensor** entbindet nicht von der Aufsichtspflicht über die damit gesicherten Bewohner, sondern unterstützt pflegende Personen dabei, Beobachtungszeiträume verlängern zu können. Das System ist regelmäßig auf Funktion zu kontrollieren und bei Abweichungen von einer fach- und sachkundigen Person zu überprüfen.  
Lesen Sie vor der Verwendung die Unterlagen zur Bedienung und Funktionskontrolle des **VarioSwitch Atemsensors**, oder lassen Sie sich von einer sachkundigen Person einweisen.  
Dieses funkbasierende System darf nicht zur Meldung bei vorhersehbaren, lebensbedrohlichen Zuständen eingesetzt werden.

Hinweis: Diese Kurzanleitung beschreibt vereinfacht die Bedienung eines fertig angeschlossenen und eingestellten **VarioSwitch Atemsensor**-Gerätes. Der Anschluss, die Inbetriebnahme und die vollständige Bedienung sind in den Haupt-Anleitungen hinterlegt.

**Bild 1: Platzierung und Bedienelemente**

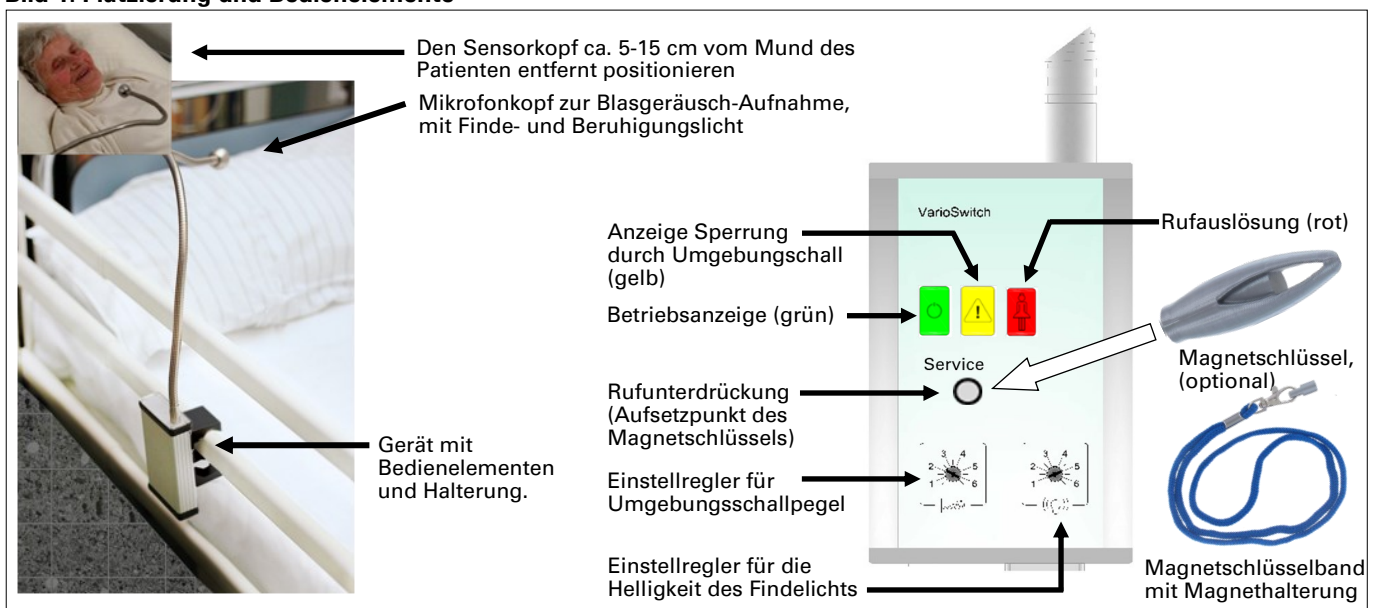

**Funktionen**

Der **VarioSwitch Atemsensor** nimmt über den Schwanenhals-Sensorkopf die vom Patienten als Ruf gedachten Blaseräusche auf und löst damit einen Patientenruf aus. So lange zu lauter Umgebungsschall vorhanden ist, wird eine Rufauslösung blockiert, um Fehlalarme durch laute Störgeräusche zu vermeiden. Die drei Betriebsanzeigen zeigen den Gerätestatus an

**Rufunterdrückung**

Durch das Aufsetzen eines (optionalen) Magnetschlüssels auf die mit „Service“ gekennzeichnete Vertiefung lassen sich z.B. während Pflege- und Einstellmaßnahmen auftretende Rufe unterdrücken.

| Anzeige- / Bedienelement          | Piktogramm | Betriebszustand   |
|-----------------------------------|------------|---|
| Betriebsanzeige (grün)            |            | Muss immer leuchten.  |
| Rufanzeige (rot)                  |            | Leuchtet während eines Rufes. Danach erlischt sie. Parallel leuchtet die Ruf-LED am Funkmodul. Bei Testrufen zusätzlich auf mögliche „Batterie-schwach“-Meldung achten. |
| Umgebungsschall (gelb)            |            | Leuchtet bei lauten Umgebungsgerauschen. Während dieser Anzeige ist die Auslösung von Rufen nicht möglich.  |
| Findelicht am Mikrofonkopf (blau) |            | Leuchtet immer (Helligkeit regelbar)  |

**Rufmeldung abstellen**

Der **VarioSwitch Atemsensor** leitet einen Rufimpuls zur Rufanlage. Wenn erforderlich, muss dieser an der Rufanlage abgestellt werden.