


Standardfunktionen des VarioCare

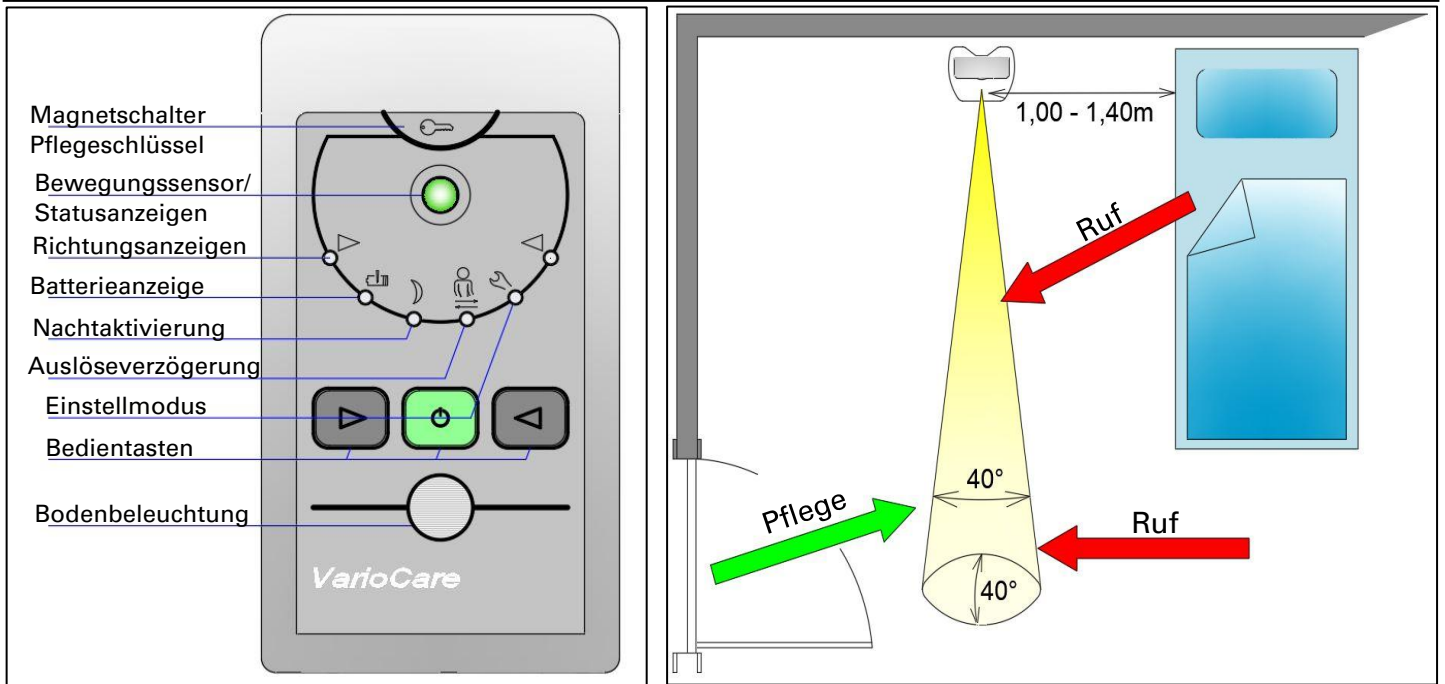

<p>Ein-/Ausschalten</p> <p> jeweils lange drücken</p> <p>Pflegemodus aktivieren</p> <p> oder kurz drücken</p> <p>siehe Seite 2</p>	<p>Pflegemodus</p> <p>Status blinkt grün</p>	<p>Voralarm Ruf</p> <p>6x Piep</p>	<p>Voralarm Pflege</p> <p>Betrieb</p>	<p>Richtungserkennung</p> <p>Rufauslösung von</p>
---	---	---	--	--

Inbetriebnahme

Einschalten
Mittlere Taste **lange** drücken

Automatische Initialisierung
Richtungsanzeigen blinken

Funktionsprüfung / Gehtest
Beide Richtungsanzeigen signalisieren Bewegungen*

Funktionsprüfung beenden
Taste rechts oder links **kurz** drücken

Statusanzeige blinkt ca. 30 Sek. Abwechselnd grün-rot

Betriebsmod.

*Bei eingeschalteter Richtungserkennung blinkt die LED, aus der eine Bewegung wahrgenommen wird.


Betriebsmod.

Betriebsmodus VarioCare: Die Richtungsanzeigen blinken **langsam**.

Bei Aktivierungen des Erfassungsbereiches zeigen die Richtungsanzeigen statisch an, von welcher Seite ein Alarm erfasst wird. Bei Betreten des Sensorbereiches wird ein Voralarm von 10 Sek. aktiviert und die **Statusanzeige** blinkt **rot**. Während dieser Zeit **kann** der Pflegemodus gesetzt werden. Nach Ablauf der Voralarmzeit wird ansonsten ein Alarmruf ausgelöst.

Einlernen an einen VARIOREC® Funkempfänger (nicht im Lieferumfang)

Zum Einlernen des VarioCare Bewegungssensors muss zunächst der entsprechende VarioRec Funk-Empfänger in den Lernmodus gebracht werden (siehe Anleitung Funkempfänger)!

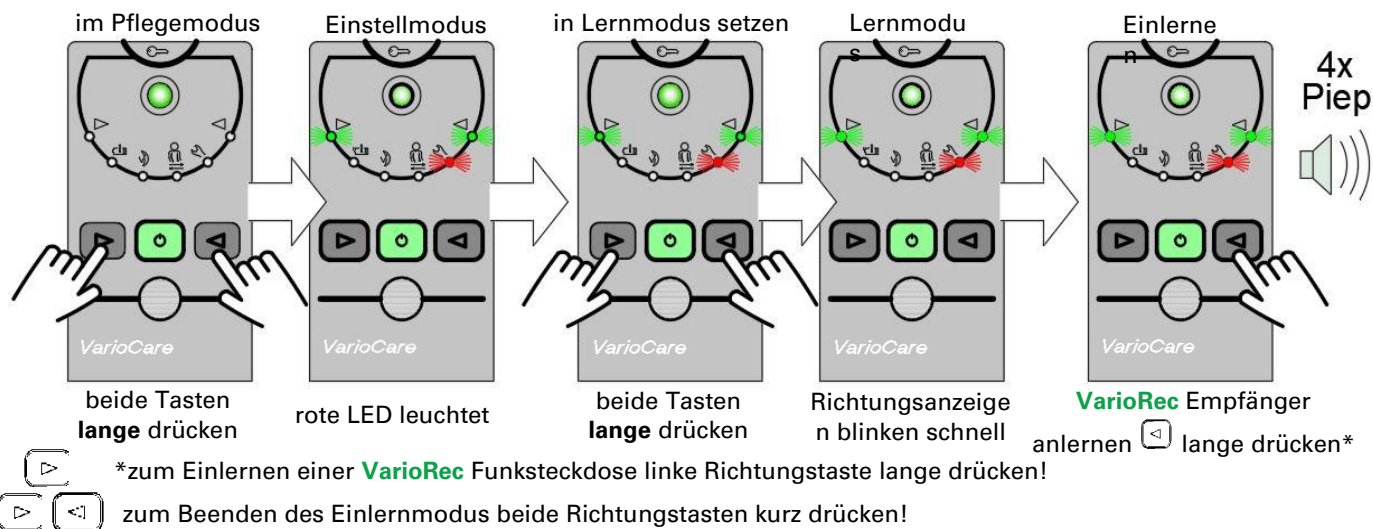

Möglichkeiten zur Pflegemodus-Aktivierung(Pflegezeit 10 Minuten voreingestellt)

- über Taster am VarioCare oder
- über Pflegeschlüssel am VarioCare
- automatisch über Richtungserkennung
- über VarioCare Remote
- über VarioCare Funkfernbedienung (Zubehör)
- über Pfeigetaster Fußbetrieb (Zubehör)

Pflegeschlüssel (im Lieferumfang)



Über den Magnetschlüssel besteht die Möglichkeit, den VarioCare in den Pflegemodus zu setzen. Dazu wird der Magnetschlüssel kurz oben am VarioCare vor die Fläche mit dem Schlüsselssymbol gehalten. Die Statusanzeige **blinkt** daraufhin **grün** und zeigt die Aktivierung des Pflegemodus an.



Achtung:
 Verbleibt der Pflegeschlüssel auf der Aktivierungsfläche (Schlüsselssymbol) des VarioCare, bleibt die Pflegezeit *so lange aktiv*, bis der Schlüssel wieder entfernt wird!

Batteriemanagement

Auf der Unterseite des VarioCare befindet sich die Ladebuchse zum Aufladen des internen Lithium-Ionen Akkumulators. Um diesen zu laden sind **nur** vom Hersteller bereitgestellte und zugehörige Netzteile zu nutzen. Das Ladekabel ist **nicht im zusammengerollten** Zustand bei der Ladung zu verwenden (Überhitzungsgefahr).



Achtung!
 Den VarioCare nicht längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen!
 Die Umgebungstemperatur darf **-15 °C** nicht **unter-** und **+60 °C** nicht **überschreiten**.
 Bei Missachtung kann der interne Akkumulator irreparabel geschädigt werden!

Sensorbedingt können extrem langsame Bewegungen (<4m/s) nicht immer richtig erkannt und ausgewertet werden!