



**Warnung**

Die Verwendung eines Rufgerätes entbindet nicht von der Aufsichtspflicht über die damit unterstützten Personen. Als funkbasierendes System ist es nicht zur Meldung von vorhersehbaren, lebensbedrohlichen Zuständen zugelassen.


Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Kenntnis über den Inhalt der vollständigen **VarioRec7**-Anleitung LE371, verfügbar auf [www.lehmannweb.de](http://www.lehmannweb.de).

**Hinweis:** In dieser Übersicht wird der „**VarioRec7** Funkempfänger“ abgekürzt als „Funkempfänger“ oder „Empfänger“ bezeichnet.

In dieser Kurzanleitung sind nur die wesentlichen Funktionen - ohne mögliche Störfälle - beschrieben.

**Funkempfänger in Betrieb nehmen**

Der **VarioRec 7** ist nach Herstellen der Spannungsversorgung sofort betriebsbereit.

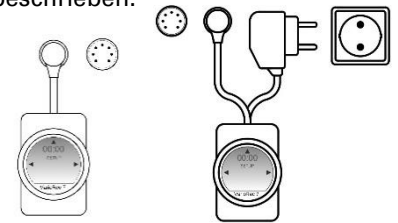

**Funksender einlernen**

Lernmodus	Einlernen	Sendertyp
Display rechts > drücken und halten währenddessen Stromversorgung herstellen	Cursortaste rechts > "Einlernen" auswählen	
	Innerhalb von 60 s Sender auslösen	
	Einlernen Bitte warten	
	Nochmals innerhalb von 60 s auslösen	Symbol mit Cursor $\nabla$ oder $\blacktriangle$ auswählen (erscheint bei Auslösung des Senders)
		Zur Bestätigung Cursor > betätigen
		Dem Sender wird eine Nummer (z.B. #04) zugewiesen

Der nächste Sender kann eingelernt werden. Nach 60 Sekunden begibt sich der **VarioRec 7** automatisch in den Betriebsmodus. Mit der linken Cursortaste wird der Lernmodus wieder angezeigt. Bei nochmaligem Drücken der linken Taste wird der Betriebsmodus aktiviert.

Der **VarioRec 7** empfängt alle **VarioMobil**-Sender des gleichen Frequenzbereiches. Er leitet aber nur die Rufe von registrierten oder eingelernten Sendern weiter.


**Sender auslernen**

**Sender ist vorhanden:**

Lernmodus	Auslernen	Automatisch
Display rechts > drücken und halten währenddessen Stromversorgung herstellen	Cursortaste unten $\nabla$ "Auslernen" auswählen	
	Cursortaste > wählen	
	Automatisch Cursor > wählen	Innerhalb von 60 s Sender auslösen
		Sender #01 auslernen? Cursor > wählen
		Innerhalb von 60 s Sender auslösen
		Sender ist ausgelernt

Der nächste Sender kann ausgelernt werden. Nach 60 Sekunden begibt sich der **VarioRec 7** automatisch in den Betriebsmodus. Mit der linken Cursortaste wird der Lernmodus wieder angezeigt. Bei nochmaligem Drücken der linken Taste wird der Betriebsmodus aktiviert.

**Sender ist nicht vorhanden oder defekt:**

Lernmodus	Auslernen	Manuell
Display rechts > drücken und halten währenddessen Stromversorgung herstellen	Cursortaste unten ∨ "Auslernen" auswählen	
	Cursortaste ∨ wählen	
	Manuell Cursor > wählen	Sender #01 auslernen?
		Mit Cursor ^ oder ∨ zu löschende Sendernummer auswählen
		Cursortaste > wählen
		Sender #01 ausgelernt

Der nächste Sender kann ausgelernt werden. Der **VarioRec 7** begibt sich automatisch zurück in den Lernmodus. Bei Drücken der linken Taste wird der Betriebsmodus aktiviert.

**Meldungen des Funkempfängers**

Bei Einschalten oder eine Minute nach Eingabe eines Befehles bzw. Rufweitergabe dunkelt das Display ab. So kann das Licht den Bewohner oder Patienten nicht stören, vor allem wenn es im Raum dunkel ist.

Bei Auslösen eines passenden Senders werden im Display des **VarioRec 7** das beim Einlernen ausgewählte Symbol und die Sendernummer auf rotem Hintergrund dargestellt.

Sender	VarioRec 7	Meldungen
Auslösen des Senders, z.B. des VarioMobil	Ruf wird an das Rufsystem weitergegeben	Bei Einlernen gewähltes Symbol und Sendernummer werden dargestellt
		Meldungen sind: Rufe und Störungen <sup>1</sup>
		Bei Anliegen mehrerer Meldungen können diese über Cursor > aufgerufen werden
		Störungen werden mit Cursor ∨ manuell zurückgesetzt

Während der gesetzten Anwesenheit wird der Fehlerspeicher eine Minute angezeigt. Die Störungen können mit den Kursortasten < und > durchgesehen und mit der Cursortaste ∨ gelöscht werden.

Farbliche Darstellung	Meldungsart 50134	Meldungsart 0834
<b>rot</b>	Ruf	Ruf
<b>orange</b>	Störung <sup>1</sup>	Störung <sup>1</sup>
<b>gelb</b>	Störung <sup>1</sup> bei erloschenem Beruhigungslicht	Störung <sup>1</sup> bei erloschenem Beruhigungslicht
<b>grün</b>	Ruf quittiert/Störung aufgehoben (erlischt nach einer Minute)	Ruf quittiert/Störung aufgehoben (erlischt nach einer Minute)

<sup>1</sup>Störungen sind z.B. Battery low, Sender nicht erkannt (fehlende Tagesmeldung oder erfolglose 30 sec Meldung), Frequenzblockade

**Einlernbare Sender:**

wird der **VarioRec 7** im **Modus 0834** betrieben, können bis zu **8 Sender** eingelernt werden. Im **Normalmodus** oder **Modus 50134** ist es möglich, bis zu **63 Sender** einzulernen. Weitere Informationen entnehmen Sie der Anleitung LE371.